



## LINEA GERMOCID - SCHEDA TECNICA

### GERMOCID 2%

GERMOCID 2% è un Dispositivo Medico CE 0546 di classe IIb conforme alla Direttiva 93/42/CEE.

GERMOCID 2% è una soluzione pronta all'uso con azione detergente e disinettante per dispositivi medici invasivi e strumenti chirurgici. L'efficacia di GERMOCID 2%, sia come detergente che come disinettante, in presenza di materiale organico (sangue, saliva, essudati organici), consente di utilizzarlo su tutti gli strumenti odontoiatrici e/o chirurgici. La rimozione dello sporco non necessita di azione meccanica. È attivo contro i batteri Gram-positivi e Gram-negativi, fungi, micobatteri e virus (compresi HIV-HBV-HCV).



#### APPLICAZIONI

GERMOCID 2% è un prodotto pronto all'uso specifico per la detersione, la disinfezione e per la decontaminazione prima della sterilizzazione di strumenti chirurgici e dispositivi medici invasivi. Per uso professionale, si usa tal quale.

#### ISTRUZIONI PER L'USO

Immergere gli strumenti da trattare nella soluzione come da tabella. Risciacquare abbondantemente con acqua prima dell'utilizzo.

Può essere utilizzato anche in vasche ad ultrasuoni.

#### TEMPI DI CONTATTO:

Batteri	15 minuti
Fungi	15 minuti
Micobatteri	60 minuti
Virus (Adenovirus, HIV-HCV-HBV)	60 minuti

#### CONFEZIONI

Codice interno:	Imballo primario:	Imballo secondario:
F111	Flaconi da 1000 ml	Scatola da 12 flaconi

Barcode	ITF	Misura scatola (mm)	Composizione pallet
8009110025509	08009110025509	335 l x 253 p x 274 h	40 ct (4 piani x 10)

Tutti gli imballi primari sono in polietilene ad alta densità secondo le specifiche tecniche previste dalla Farmacopea. Tale materiale non contiene allergizzanti ed è perfettamente compatibile con tutti i componenti del formulato.



## LINEA GERMOCID - SCHEDA TECNICA

### GERMOCID 2%

#### **COMPOSIZIONE**

100,0 g di prodotto contengono:  
Benzalconio cloruro 2,0 g; O-fenilfenolo 0,2 g; coformulanti; acqua depurata q.b. a 100,0 g.

#### **CARATTERISTICHE**

Liquido incolore/verde tenue non profumato.

#### **ATTIVITA'**

GERMOCID 2% è una soluzione pronta all'uso che svolge una rapida ed efficace azione detergente e disinettante.  
È attivo contro i batteri Gram-positivi e Gram-negativi, funghi, micobatteri e virus.

Norma	Attività	Tempi di contatto
EN13727-EN14561	Battericida	15 minuti
EN13624-EN14562	Fungicida	15 minuti
EN14348-EN14563	Micobattericida	60 minuti
EN14476	Virucida (Adenovirus, HIV-HCV-HBV)	60 minuti

#### **VALIDITA'**

3 anni. Il periodo di validità indicato si riferisce al prodotto conservato nel suo contenitore e correttamente utilizzato e conservato.

#### **MODALITA' DI CONSERVAZIONE**

Conservare in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.

#### **CONTROLLI QUALITA'**

I componenti (materie prime, contenitori, etichette, etc.) e le fasi di lavorazione di ogni singolo lotto vengono puntualmente e accuratamente controllati internamente seguendo le procedure del Sistema di Gestione della Qualità aziendale certificato UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 13485.

#### **AUTORIZZAZIONI**

Dispositivo Medico CE 0546 di Classe IIb conforme alla Direttiva 93/42/CEE come emendata dalla Direttiva 2007/47/CEE.

#### **INFORMAZIONI RISERVATE AGLI OPERATORI SANITARI E UTILIZZATORI PROFESSIONALI**