



LINEA GERMOCID - SCHEDA TECNICA

GERMOCID ENZIMATICO

GERMOCID ENZIMATICO è un detergente enzimatico Dispositivo Medico di Classe I conforme al Regolamento (UE) 745/2017.

GERMOCID ENZIMATICO è una soluzione con una formula concentrata a base di Enzimi Proteolitici, appositamente studiata per il lavaggio e la detersione di strumenti chirurgici ed odontoiatrici prima della procedura di disinfezione/sterilizzazione.

GERMOCID ENZIMATICO agisce efficacemente sui residui organici, anche quelli secchi, e sullo sporco più ostinato. Può essere impiegato su strumenti realizzati con vari materiali come vetro, plastica e metallo, ecc. E' particolarmente efficace su sonde, strumenti a fibre ottiche, apparecchi per anestesia, terapia inalante, emodialisi, endoscopia e urologia.

GERMOCID ENZIMATICO è indicato anche per l'utilizzo in apparecchi ad ultrasuoni.



APPLICAZIONI

Detergente a base enzimatica per strumenti chirurgici ed odontoiatrici.

ISTRUZIONI PER L'USO

Diluire GERMOCID ENZIMATICO in acqua in ragione dello 0,6-10% in un litro di acqua tiepida e mescolare accuratamente.

Prima di immergere gli strumenti nella soluzione preparata, si consiglia di decontaminarli con un prodotto specifico, quindi risciacquarli usando acqua fredda ed immergerli per 10 minuti.

In presenza di residui secchi, portare il tempo di immersione a 1 ora ed eventualmente usare uno spazzolino. Completare i processi con una serie di risciacqui, l'ultimo dei quali con acqua sterile.

CONFEZIONI

Codice interno:	Imballo primario:	Imballo secondario:
B411	Flaconi da 1000 ml	Scatola da 12 flaconi
B413	Taniche da 3000 ml	Scatola da 6 taniche

Barcode	ITF	Misura scatola (mm)	Composizione pallet
8009110025097	08009110025097	335 l x 253 p x 274 h	40 ct 4 piani x 10)
8009110026193	08009110026193	331 l x 307 p x 268 h	24 ct (4 piani x 6)

Tutti gli imballi primari sono conformi alle specifiche tecniche previste dalla Farmacopea. I materiali non contengono allergizzanti e sono perfettamente compatibili con tutti i componenti del formulato.



LINEA GERMOCID - SCHEDA TECNICA

GERMOCID ENZIMATICO

COMPOSIZIONE

Tensioattivi non ionici 15-30%; Tensioattivi anionici 5-15%; Enzimi; Profumo (Limonene, Citral), Conservante (Benzisothiazolinone).

CARATTERISTICHE

Liquido limpido verde con una gradevole profumazione al limone.

VALIDITA'

3 anni. Il periodo di validità indicato si riferisce al prodotto conservato nel suo contenitore e correttamente utilizzato e conservato.

MODALITA' DI CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.

CONTROLLI QUALITA'

I componenti (materie prime, contenitori, etichette, etc.) e le fasi di lavorazione di ogni singolo lotto vengono puntualmente e accuratamente controllati internamente seguendo le procedure del Sistema di Gestione della Qualità aziendale certificato UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 13485.

AUTORIZZAZIONI

Dispositivo Medico CE di classe I conforme al Regolamento (UE) 745/2017.

INFORMAZIONI RISERVATE AGLI OPERATORI SANITARI E UTILIZZATORI PROFESSIONALI