



**Germodis**®  
S.P.A.

Capitale Sociale € 156.000,00 interamente versato - R.E.A. 497966 Cod. Fisc. e Part. IVA 00772350153 - Iscr. 125750 R.I. Canc. Trib. MI

Sede Legale Stabilimento e Uffici: 20032 CORMANO (Milano) Via Giotto, 19/21  
Telefono +39-0266301938 r.a. - Telefax +39-0266301939  
E-mail: info@germodis.com www.germo.it

## LINEA NEUTRALIZZANTI - SCHEDA TECNICA

# DEACTIVATOR

DISATTIVATORE DI SOLUZIONI DISINFETTANTI

CONTENENTI GLUTARALDEIDE

PRIMA DELLO SMALTIMENTO



### ISTRUZIONI PER L'USO

#### FASE 1:

Aggiungere mescolando accuratamente 50 ml (due misurini da 25 ml) di DESACTIVATOR FASE 1 - con etichetta verde, per ogni litro di soluzione contenente il 2% di Glutaraldeide (es. GERMOCID GLUTACARE). Eventuali dosi in eccesso non sono comunque dannose. Lasciare reagire per 24 ore. A reazione avvenuta il liquido avrà assunto una diversa colorazione.

#### FASE 2:

Aggiungere 50 ml (due misurini) di DESACTIVATOR FASE 2 - con etichetta rossa al liquido già trattato nella fase 1 mescolando accuratamente e lasciar reagire per un'ora circa prima di scaricare il prodotto. La soluzione disattivata rispetta l'ambiente.

### CONFEZIONI

Codice interno:	Imballo primario:	Imballo secondario:
D200	Un astuccio contiene: - 1 flacone di DESACTIVATOR FASE 1 etichetta Verde da 300 ml - 1 flacone di DESACTIVATOR FASE 2 etichetta Rossa da 300 ml	Scatola da 6 astucci

Tutti gli imballi primari sono in polietilene ad alta densità (HDPE) secondo le specifiche tecniche previste dalla Farmacopea. Tale materiale non contiene lattice ed è perfettamente compatibile con tutti i componenti del formulato.



**Germodis**®  
S.P.A.

Capitale Sociale € 156.000,00 interamente versato - R.E.A. 497966 Cod. Fisc. e Part. IVA 00772350153 - Iscr. 125750 R.I. Canc. Trib. MI

Sede Legale Stabilimento e Uffici: 20032 CORMANO (Milano) Via Giotto, 19/21  
Telefono +39-0266301938 r.a. - Telefax +39-0266301939  
E-mail: info@germodis.com [www.germodis.com](http://www.germodis.com)

## LINEA NEUTRALIZZANTI - SCHEDA TECNICA

# DEACTIVATOR

### COMPOSIZIONE

Fase 1: Contiene Idrossido di Sodio.

Fase 2: Contiene Acido Cloridrico.

### CARATTERISTICHE

Liquido limpido incolore ed inodore. Fase 1 a pH basico. Fase 2 a pH acido.

### ATTIVITÀ

Disattivare prima della smaltimento le soluzioni disinfettanti a base di Glutaraldeide.

### VALIDITÀ

5 anni. Se correttamente conservato il prodotto mantiene la validità indicata.

### MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo da fonti di calore.

### CONTROLLI QUALITÀ

I componenti (materie prime, contenitori, etichette, etc.) e le fasi di lavorazione di ogni singolo lotto vengono puntualmente e accuratamente controllati internamente seguendo le procedure del Sistema di Gestione della Qualità aziendale certificato UNI EN ISO 9001.

**INFORMAZIONI RISERVATE AGLI OPERATORI SANITARI E UTILIZZATORI PROFESSIONALI**