



Germodis®
S.P.A.

Capitale Sociale € 156.000,00 interamente versato - R.E.A. 497966 Cod. Fisc. e Part. IVA 00772350153 - Iscr. 125750 R.I. Canc. Trib. MI

Sede Legale Stabilimento e Uffici: 20032 CORMANO (Milano) Via Giotto, 19/21
Telefono +39-0266301938 r.a. - Telefax +39-0266301939
E-mail: info@germodis.com www.germodis.it


LINEA GERMOCID - SCHEDE TECNICHE

GERMOCID BASIC WIPES 220

GERMOCID BASIC WIPES è un Dispositivo Medico CE 0546 di classe IIa conforme alla Direttiva 93/42/CEE.

GERMOCID BASIC WIPES è un fazzolettino intriso di una soluzione alcolica specifico per la disinfezione e deterzione rapida di dispositivi medici non invasivi. Comodo e pratico GERMOCID BASIC nel suo formato WIPES viene utilizzato per la disinfezione delle superfici dei dispositivi medici in uso presso gli studi medici/dentistici o i centri estetici per disinfettare, ad esempio: piani d'appoggio, lettini, riuniti, braccioli e maniglie, etc.

GERMOCID BASIC WIPES agisce anche in presenza di materiale organico (sangue, saliva, essudati organici, etc.) e svolge un'efficiente azione detergente/sgrassante. Un'ulteriore caratteristica del prodotto è la sua capacità di evaporare velocemente, rendendolo ancora più pratico e veloce da utilizzare.

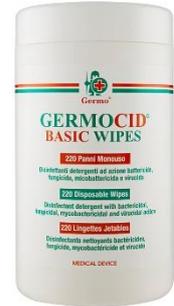

ISTRUZIONI PER L'USO

Estrarre il panno dalla confezione e passarlo in modo uniforme sulla superficie da trattare. Assicurarsi che gli oggetti e le superfici siano completamente inumiditi. Richiudere adeguatamente la confezione per evitare l'evaporazione del contenuto.

Lasciare agire per i tempi indicati. Non risciacquare.

Tempi di contatto:

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Virus (Adenovirus, HIV-HBV-HCV) | 5 minuti |
| Batteri e funghi | 5 minuti |
| Micobatterio Tuberculare (TBC) | 60 minuti |

CONFEZIONI

| | | |
|-----------------|--|------------------------|
| Codice interno: | Imballo primario: | Imballo secondario: |
| R613 | Barattolo contenente rotolo da 220 strappi | Scatola da 6 barattoli |

| | | | |
|---------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| Barcode | ITF | Misura scatola (mm) | Composizione pallet |
| 8009110030336 | 18009110030333 | 309 l x 207 p x 192 h | 84 ct (7 piani x 12) |

Tutti gli imballi primari sono in polietilene ad alta densità (HDPE) secondo le specifiche tecniche previste dalla Farmacopea. Tale materiale non contiene lattice ed è perfettamente compatibile con tutti i componenti del formulato.



Germodis®
S.P.A.

Sede Legale Stabilimento e Uffici: 20032 CORMANO (Milano) Via Giotto, 19/21
Telefono +39-0266301938 r.a. - Telefax +39-0266301939
E-mail: info@germodis.com www.germodis.com

Capitale Sociale € 156.000,00 interamente versato - R.E.A. 497966 Cod. Fisc. e Part. IVA 00772350153 - Iscr. 125750 R.I. Canc. Trib. MI

LINEA GERMOCID - SCHEDA TECNICA

GERMOCID BASIC WIPES 220

COMPOSIZIONE

100,0 g di soluzione imbevibile contengono: Clorexidina Digluconato 0,1 g; Benzalconio Cloruro 0,1 g; Alcol Etilico 45,0 g, Alcol Isopropilico 15,0 g; Coformulanti, acqua depurata q.b. a 100,0 g.

CARATTERISTICHE

Fazzolettini imbevibili senza profumo aggiunto.

ATTIVITÀ

La soluzione di cui è imbevibile GERMOCID BASIC WIPES è caratterizzata da un elevato tenore alcolico, Clorexidina e Sale d'Ammonio quaternario. La sinergia tra i principi attivi garantisce un ampio spettro d'azione nei confronti dei batteri Gram-positivi e Gram-negativi, funghi (lieviti e muffe), virus (Adenovirus, HIV, HBV, HCV) in 5 minuti, Micobatterio tubercolare in 60 minuti.

TEST

EN13727; EN13624; EN14348; EN13697; EN14561; EN14562; EN14476.

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

VALIDITÀ

3 anni. Il periodo di validità indicato si riferisce al prodotto conservato nel suo contenitore e correttamente utilizzato e conservato.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.

CONTROLLI QUALITÀ

I componenti (materie prime, contenitori, etichette, etc.) e le fasi di lavorazione di ogni singolo lotto vengono puntualmente e accuratamente controllati internamente seguendo le procedure del Sistema di Gestione della Qualità aziendale certificato UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 13485.

AUTORIZZAZIONI

Dispositivo Medico CE 0546 di classe IIa conforme alla Direttiva 93/42/CEE come emendata dalla Direttiva 2007/47/CEE.

INFORMAZIONI RISERVATE AGLI OPERATORI SANITARI E UTILIZZATORI PROFESSIONALI