



Germodis®
S.P.A.

Capitale Sociale € 156.000,00 interamente versato - R.E.A. 497966 Cod. Fisc. e Part. IVA 00772350153 - Iscr. 125750 R.I. Canc. Trib. MI

Sede Legale Stabilimento e Uffici: 20032 CORMANO (Milano) Via Giotto, 19/21
Telefono +39-0266301938 r.a. - Telefax +39-0266301939
E-mail: info@germodis.com www.germodis.it

SCHEMA TECNICA

NEX CLOREX C2 – SCRUB SYSTEM

NEX CLOREX C2 Scrub System è un sistema brevettato, costituito da uno spazzolino flessibile monouso con spugnetta imbibita di soluzione disinfettante a base di Clorexidina e lancia pulisci unghie.

NEX CLOREX C2 Scrub System è particolarmente indicato per la pulizia e disinfezione delle mani del chirurgo in sala operatoria grazie al principio attivo Clorexidina Digluconato.

La presenza di Clorexidina Digluconato al 4% assicura un'azione biocida contro batteri Gram-positivi e Gram-negativi risultando un efficace antisettico per mani e cute in generale.



ISTRUZIONI PER L'USO

NEX CLOREX C2 è adatto per la pulizia delle mani e degli avambracci del chirurgo.

Prima dell'utilizzo, inumidire la cute con acqua. Piegare la spazzolina per garantire la fuoriuscita del liquido disinfettante. L'utilizzo della spugna imbevuta garantisce la distribuzione uniforme del prodotto sulle mani inumidite. Frizionare per almeno 3 minuti, risciacquare ed asciugare le mani utilizzando un panno sterile.

CONFEZIONI

Codice interno:	Imballo primario:	Imballo secondario:	Imballo terziario:
A865	Blister monouso	Scatola da 40 pezzi	Scatola master con 6 scatole da 40 pezzi (240 pezzi totali)

Tutti gli imballi primari sono in conformità alle specifiche tecniche previste dalla Farmacopea. Tale materiale non contiene lattice ed è perfettamente compatibile con tutti i componenti del formulato.



Germodis®
S.P.A.

Capitale Sociale € 156.000,00 interamente versato - R.E.A. 497966 Cod. Fisc. e Part. IVA 00772350153 - Iscr. 125750 R.I. Canc. Trib. MI

Sede Legale Stabilimento e Uffici: 20032 CORMANO (Milano) Via Giotto, 19/21
Telefono +39-0266301938 r.a. - Telefax +39-0266301939
E-mail: info@germodis.com www.germodis.com

SCHEMA TECNICA

NEX CLOREX C2 – SCRUB SYSTEM

COMPOSIZIONE

100,0 g di soluzione contengono:

Clorexidina digluconato 4,0 g; coformulanti ed acqua depurata q.b. a 100,0 g.

CARATTERISTICHE

Soluzione limpida di colore rosa chiaro-arancio delicatamente profumata.

ATTIVITÀ

Clorexidina Digluconato è attiva contro i batteri Gram-positivi e Gram-negativi.

TEST

EN 1040; EN 12054; EN 12791.

AVVERTENZE

Per uso esterno. Non usare su cute lesa e mucose. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

VALIDITÀ

Il periodo di validità quantificato in 36 mesi si riferisce al prodotto correttamente conservato.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo da fonti di calore.

CONTROLLI QUALITÀ

I componenti (materie prime, contenitori, etichette, etc.) e le fasi di lavorazione di ogni singolo lotto vengono puntualmente e accuratamente controllati internamente seguendo le procedure del Sistema di Gestione della Qualità aziendale certificato UNI EN ISO 9001.

AUTORIZZAZIONI

Presidio Medico Chirurgico - Registrazione Ministero della Salute N. 18.976.

INFORMAZIONI RISERVATE AGLI OPERATORI SANITARI E UTILIZZATORI PROFESSIONALI