



**Germodis**®  
S.P.A.

Capitale Sociale € 156.000,00 interamente versato - R.E.A. 497966 Cod. Fisc. e Part. IVA 00772350153 - Iscr. 125750 R.I. Canc. Trib. MI

Sede Legale Stabilimento e Uffici: 20032 CORMANO (Milano) Via Giotto, 19/21  
Telefono +39-0266301938 r.a. - Telefax +39-0266301939  
E-mail: info@germodis.com www.germodis.it

## LINEA GERMOCID - SCHEDA TECNICA

# GERMOCID INSTRUMENTS

GERMOCID INSTRUMENTS è un Dispositivo Medico CE 0546 di classe IIb conforme alla Direttiva 93/42/CEE.

GERMOCID INSTRUMENTS è una soluzione concentrata che svolge una rapida ed efficace azione detergente e disinfettante, prima della sterilizzazione in autoclave.

La soluzione diluita di GERMOCID INSTRUMENTS viene utilizzata su strumenti chirurgici invasivi contaminati da materiale organico (sangue, saliva ed essudati biologici) e non necessita di azione meccanica per completare il processo di detersione.

GERMOCID INSTRUMENTS è un prodotto specifico per la decontaminazione, la detersione e la disinfezione di alto livello di strumenti chirurgici invasivi: la formulazione è attiva sia contro i batteri Gram-positivi sia Gram-negativi, i funghi, i micobatteri e i virus (Adenovirus, HIV, HBV, HCV). Questo prodotto è privo di aldeidi, coloranti, sostanze tossiche o dannose per la salute. GERMOCID INSTRUMENTS abbina all'elevata efficacia antimicrobica, un'eccellente azione pulente grazie all'azione sinergica dei principi attivi e dei tensioattivi presenti in formula. GERMOCID INSTRUMENTS esplica la massima attività biocida con la necessaria compatibilità verso i materiali agendo anche in presenza di acque dure e sporco organico. Gli specifici inibitori di corrosione garantiscono l'assoluta compatibilità del prodotto con i materiali più frequentemente utilizzati in ambito odontoiatrico ed ospedaliero.



### ISTRUZIONI PER L'USO

GERMOCID INSTRUMENTS si usa diluito in acqua in concentrazioni variabili a seconda del grado di disinfezione che si vuole ottenere. Per preparare la soluzione utilizzare il misurino se in dotazione. Immergere gli strumenti da trattare per il tempo di contatto prescelto. Risciacquare abbondantemente con acqua prima dell'utilizzo. La soluzione rimane stabile per una settimana. In caso di uso frequente e con strumenti particolarmente contaminati o sporchi si consiglia di sostituire la soluzione giornalmente. GERMOCID INSTRUMENTS può essere utilizzato anche in vasche ad ultrasuoni. Per uso professionale.

| Norma   | Attività        | Concentrazione | Tempi di contatto |
|---------|-----------------|----------------|-------------------|
| EN13727 | Battericida     | 10%            | 15 minuti         |
| EN14561 |                 | 5%             | 15 minuti         |
| EN13624 | Lieviticida     | 10%            | 15 minuti         |
| EN14562 |                 | 1%             | 15 minuti         |
| EN14562 | Fungicida       | 15%            | 15 minuti         |
| EN14348 | Micobattericida | 10%            | 60 minuti         |
| EN14563 |                 | 10%            | 60 minuti         |
| EN14476 | Virucida        |                |                   |
|         | Adenovirus      | 1%             | 60 minuti         |
|         | HIV, HCV, HBV   | 15%            | 60 minuti         |

### CONFEZIONI

| Codice interno: | Imballo primario:  | Imballo secondario:  |
|-----------------|--------------------|----------------------|
| F101            | Flacone da 1000 ml | Scatola da 6 flaconi |
| F105            | Tanica da 5000 ml  | Scatola da 4 taniche |

Tutti gli imballi primari sono in HDPE secondo le specifiche tecniche previste dalla Farmacopea. Tale materiale non contiene lattice ed è perfettamente compatibile con tutti i componenti del formulato.



**Germodis**®  
S.P.A.

Sede Legale Stabilimento e Uffici: 20032 CORMANO (Milano) Via Giotto, 19/21  
Telefono +39-0266301938 r.a. - Telefax +39-0266301939  
E-mail: info@germodis.com www.germodis.com

Capitale Sociale € 156.000,00 interamente versato - R.E.A. 497966 Cod. Fisc. e Part. IVA 00772350153 - Iscr. 125750 R.I. Canc. Trib. MI

## LINEA GERMOCID - SCHEDA TECNICA

# GERMOCID INSTRUMENTS

### COMPOSIZIONE

100,0 g di prodotto contengono:

Benzalconio Cloruro 10,0 g; Ortofenilfenolo 1,0 g; coformulanti; acqua depurata q. b. a 100,0 g.

### CARATTERISTICHE

Liquido color blu ottanio.

### ATTIVITÀ

GERMOCID INSTRUMENTS grazie alla sua formulazione agisce con un ampio spettro d'azione sui microrganismi patogeni quali batteri Gram-negativi e Gram-positivi, funghi, micobatteri e virus (compresi HIV, HBV, HCV).

### AVVERTENZE

In caso di uso frequente e con strumenti particolarmente contaminati o sporchi è consigliato sostituire la soluzione ogni giorno.

### VALIDITÀ

3 anni. Il periodo di validità indicato si riferisce al prodotto conservato nel suo contenitore e correttamente utilizzato e conservato.

### MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Conservare nella confezione integra in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.

### CONTROLLI QUALITÀ

I componenti (materie prime, contenitori, etichette, etc.) e le fasi di lavorazione di ogni singolo lotto vengono puntualmente e accuratamente controllati internamente seguendo le procedure del Sistema di Gestione della Qualità aziendale certificato UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 13485.

### AUTORIZZAZIONI

Dispositivo Medico CE 0546 di classe IIb conforme alla Direttiva 93/42/CEE come emendata dalla Direttiva 2007/47/CEE.

INFORMAZIONI RISERVATE AGLI OPERATORI SANITARI E UTILIZZATORI PROFESSIONALI